

# Esterilizador de copas menstruales Manual

## Precauciones de seguridad

1. Para evitar quemaduras en el cuerpo causadas por el agua hirviendo o el vapor, asegúrate de cerrar bien la tapa cuando uses el esterilizador, también recuerda mantenerlo alejado de los niños.
2. No te acerques a las salidas de vapor cuando esté funcionando, podría causar quemaduras.
3. Por favor, no coloques objetos que no sean resistentes al calor del esterilizador ya que podrían ser dañados.
4. Cuando limpies el esterilizador, corta la corriente, limpia con un paño suave y limpio o con alcohol y evita el uso de solventes orgánicos como la gasolina.
5. En caso de daños o desperfectos en el esterilizador no desables ni intentes repararlo por tu cuenta, llevalo solo con personal calificado.
6. Después de usar el esterilizador, desenchufa el cable de alimentación y guárdalo en un lugar seco

## Especificaciones

**Nombre:** Esterilizador de copas menstruales  
**Entrada:** CA 110V / 220V  
**Potencia nominal:** 250W  
**Tiempo de esterilización de la línea de agua:** 8 ~ 10 minutos.  
**Estado de funcionamiento del indicador de encendido:** rosa.

## Características

Este producto está especialmente diseñado para la desinfección de las copas menstruales, es compatible con todos los tipos y tamaños de copas menstruales en el mercado.

El esterilizador, tiene gran capacidad de agua, desinfección a alta temperatura a largo plazo, derritiendo y limpiando todo tipo de suciedad, matando eficazmente las bacterias hasta un **99.5%**.

Es de material ecológico PP, resistente a altas temperaturas, a la corrosión y con un diseño de doble aislamiento para evitar quemaduras.

Tiene un fusible incorporado para garantizar la seguridad eléctrica también contiene una lámina calefactora que está recubierta con teflón, lo que lo hace duradero y además con un diseño estético.

Es de fácil operación con un botón de encendido, diseño anti quemaduras y preservación del calor.

Aspecto elegante y compacto, conveniente para viajar y súper necesario para el cuidado íntimo femenino.

## ¿Cómo se usa?

1. Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.
2. Vierte una cierta cantidad de agua hasta que sumerja la marca del nivel del agua. Luego coloca la copa menstrual en la cámara de desinfección y asegúrate de cerrar bien la cubierta superior.
3. Presiona el botón de encendido y la luz indicadora (rosa) se encenderá, indicando así que la máquina comenzará a funcionar.
4. Usa la marca de nivel de agua recomendada, el tiempo de esterilización será de aproximadamente entre 8 - 10 minutos. El esterilizador cuenta con una función antiseccado, la corriente se cortará automáticamente cuando se evapore la totalidad del agua, apaga o desenchufa el cable de alimentación cuando finalice la desinfección.
5. Deja enfriar antes de sacar y usar la copa menstrual ya desinfectada.

**Observaciones:** el producto tiene una función de preservación de calor. Cuando la máquina se enfría durante un cierto tiempo y la temperatura sea baja, comenzará a calentarse nuevamente, hasta alcanzar una cierta temperatura y se apagará nuevamente. Apaga el esterilizador o desenchufa el cable de alimentación después de completar la desinfección.

## Consejos:

Antes de comenzar el proceso de desinfección, limpia la copa menstrual y el esterilizador. La copa menstrual puede colocarse en el esterilizador y almacenarse en un lugar seco.


## Precauciones

En caso de problemas de calidad del producto causados por factores no humanos dentro de un año, a partir de la fecha de compra, comunícate con el distribuidor para el reemplazo completo de la máquina.

Cuando participes en la venta, presenta la tarjeta de servicio posventa y el comprobante de compra o la factura de la aplicación del servicio de posventa. (Proporciona una descripción o una imagen cuando se trate de problemas de calidad).

## La garantía no será efectiva si:

- 1- Uso inadecuado, operación incorrecta y daño inducido por el usuario.
- 2- Sin un comprobante de compra.
- 3- Daño causado por fuerzas irresistibles como los desastres naturales.

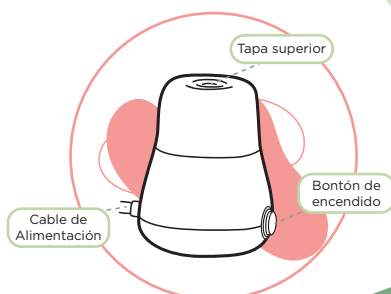

[www.greencareshop.cl](http://www.greencareshop.cl)

Certificaciones

